

FillProv

OBTURADOR PROVISÓRIO

INDICAÇÃO:

O FILLPROV é indicado para obturação temporária de cavidades em procedimentos endodônticos, dentística e prótese, prevenindo infiltrações e contaminações.

COMPOSIÇÃO:

Gesso Ortodôntico, Óxido de Zinco, Sulfato de Zinco, Sulfato de cálcio, Óxido de ferro, Óleo de silicone, Espessante, Aromatizante.

CONTEÚDO: Pote com 25g.

MODO DE USO:

O local de aplicação do produto deve estar limpo e seco. Aplicar a quantidade desejada, com auxílio de uma espátula. Tempo de pega: 3-5 minutos, Tempo de cura: 15-30 minutos. A presa do produto (endurecimento) dá-se após o contato com a saliva ou água.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES:

- Produto de uso exclusivamente profissional.
- Não utilizar como cimento restaurador definitivo.
- Fácil remoção.
- Não contém **Eugenol**.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO:

Armazenar em local limpo, seco e ao abrigo da luz.
Após o uso, manter o pote fechado.

Fabricado por:

ALLPLAN PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

R. Coronel Rodrigo, 105 - Centro - 12570-000 - Aparecida - SP

CNPJ: 17.602.891/0001-59

Autorização de Funcionamento MS: 200101H7M59X

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Responsável Técnico: Elton Garcia dos Reis - CRQ/SP 13402367

Registro MS: 80954610004

SAC: (12) 3311-0214 | www.allplan.ind.br

