

Pró-Dessense

2 em 1:

PASTA PROFILÁTICA + DESSENSIBILIZANTE

PASTA PARA PROFILAXIA E TRATAMENTO DE HIPERSENSIBILIDADE DENTINÁRIA.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

PRÓ-DESSENSE é uma pasta profilática associada à dessensibilizantes de alto desempenho baseada na tecnologia de nanopartículas de fosfato de cálcio (especificamente na forma de hidroxiapatita, $[Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_2]$), além de possuir oxalato de potássio que atua como agente despolarizante das fibras nervosas e promove a dessensibilização do dente e o fluoreto de sódio que é reconhecido pelo potencial remineralizante. Em conjunto, estas qualidades possibilitam ao PRÓ-DESSENSE remover manchas exógenas, placas, resíduos orais, restaurar a microestrutura, a composição química e a funcionalidade do tecido dental.

INDICAÇÃO:

- Limpeza profilática para remoção de manchas exógenas, placas, matéria alba e resíduos orais;
- Dessensibilizar e/ou remineralizar a superfície dental;
- Prevenção e tratamento de hipersensibilidade dentinária associada ao tratamento clareador dental;
- Remineralização de lesões de manchas brancas, descalcificação ortodôntica, pré/pós clareamento dental;
- Prevenção de lesão cariosa em pacientes de alto risco, adulto-jovens cárie ativos, pacientes ortodônticos, idosos, pacientes portadores de necessidades especiais, gestantes e pacientes com xerostomia.

NOTA:

O produto não interfere no nível de clareamento dental. De maneira que, as áreas que forem obliteradas ou remineralizadas com a aplicação do produto, não apresentarão uma estrutura diferente capaz de oferecer resistência à difusão do peróxido de hidrogênio (princípio ativo do gel clareador) ou interferir na velocidade do clareamento dental.

MECANISMO DE AÇÃO:

PRÓ-DESSENSE apresenta características químicas e estruturais semelhantes à da hidroxiapatita natural, atuando de uma maneira biocompatível, na remineralização da estrutura dental (superfície de esmalte e dentina), e na obliteração da dentina exposta e das trincas em esmalte. As partículas nanométricas de hidroxiapatita do PRÓ-DESSENSE contribui para sua penetração no interior dos túbulos de dentina expostos e em trincas em esmalte dental obliterando-os, eliminando/reduzindo, assim, a sintomatologia dolorosa.

Em relação à cariologia e da erosão, a aplicação de PRÓ-DESSENSE promove a remineralização da estrutura dentária, por meio da reposição dos íons cálcio e fosfato nas superfícies desmineralizadas em forma de hidroxiapatita, semelhante ao do dente natural. A hidroxiapatita esta na forma cristalina, ou seja, organizada, de fosfato de cálcio, e com baixa solubilidade em pH neutro, após sua aplicação ela pode se integrar com facilidade à superfície dental, que também é composta por hidroxiapatita, reparando as deficiências e mimetizando-a funcionalmente por atuar como um sistema de liberação de íons cálcio e fosfato, essencial para a manutenção do balanço mineral do dente.

COMPOSIÇÃO:

Pedra pomes, glicerina, lauril sulfato de sódio, cristais nanométricos de fosfato de cálcio na forma de hidroxiapatita, flúor, sais de potássio, flavorizante, edulcorante, corante alimentício, espessante, conservante e água purificada.

CONTEÚDO:

Bisnaga plástica com 30gr.

Pró-Dessense

2 em 1:

PASTA PROFILÁTICA + DESSENSIBILIZANTE

MODO DE USO:

Uso em consultório pré-clareamento dental:

- Antes de realizar o clareamento, aplicar pequena quantidade do PRÓ-DESSENSE nos dentes e friccionar o produto utilizando baixa rotação até completa remoção das manchas e placas.
- Deixe o material em repouso por mais 5 minutos e remova o excesso com um rolete de algodão seco ou levemente umedecido.
- Não é recomendado utilizar água para remover o PRÓ-DESSENSE ou lavar a superfície do dente após a remoção do excesso do produto.
- Seguir o procedimento de clareamento dental conforme recomendado pelo fabricante.

Tratamento de hipersensibilidade:

A redução da hipersensibilidade poderá ocorrer logo na primeira sessão. Repetir as aplicações do produto até que haja eliminação dos sintomas. Aplicações adicionais poderão ser necessárias. A remissão dos sintomas deverá ser obtida em até 5 sessões, dependendo do caso clínico.

Remineralização:

Aplique o produto 2 vezes por semana até que haja remineralização das lesões brancas de cárie, descalcificações ortodônticas e/ou até que a intensificação das lesões de erosão seja controlada.

Nota: Utilizar o produto com um intervalo mínimo de 24 horas entre cada aplicação.

Uso Caseiro sob supervisão de um dentista:

- O produto pode ser aplicado com um cotonete, com os dedos, com uma escova dental ou com o uso de uma moldeira.
- Friccione o produto sobre a superfície dental durante 1 minuto.
- Deixe o material em repouso por 3 a 5 minutos.
- Remova o excesso de material com um cotonete ou rolete de algodão seco ou levemente umedecido.
- Não é recomendado utilizar água para remover o PRÓ-DESSENSE ou lavar a superfície do dente após a remoção do excesso do produto.
- Evitar a ingestão do produto.
- Orientar o paciente para não ingerir alimentos sólidos e líquidos por até 30 minutos após a aplicação do material.
- Utilizar o produto uma vez ao dia até que haja eliminação dos sintomas.

Precauções:

- Deve-se tomar cuidado durante o procedimento para evitar a abrasão excessiva de qualquer material restaurador presente, estes são suscetíveis ao desgaste devido à baixa dureza.
- Aplicar cuidadosamente nas áreas com dentina exposta.
- Suspender o uso caso o paciente apresente alguma alergia aos componentes da fórmula.
- Produto de uso exclusivamente profissional.

Condições de Armazenamento e Transporte:

Armazenar bem fechado em local limpo, seco e fresco.

Fabricado por:

ALLPLAN PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

Rua Coronel Rodrigo, 105 - Centro, 12570-000 - Aparecida - SP

CNPJ: 17.602.891/0001-59

Autorização de Funcionamento MS: 200101H7M59X

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Responsável Técnico: Elton Garcia dos Reis

CRQ/SP 13402367 - Registro MS: 80954610005

SAC: (12) 3311-0214 - www.allplan.ind.br



allplan